

PRISES MURALES

Prise DIN

Prise murale au standard allemand (DIN) pour fluides médicaux conçue pour effectuer des branchements rapides sans aucun risque d'intervention des fluides. Elle est également équipée d'une position « parking ».



Prise DIN O₂ en saillie

Haut niveau de sécurité

Détrompage géométrique et dimensionnelle de la prise en fonction du gaz.

Maintenance sécurisée

Aucune coupure de gaz nécessaire grâce à un clapet anti-retour.

Système de détrompage plastique évitant toute intervention de gaz lors du montage.

Traçabilité grâce au gravage sur le corps de la prise du lot Année/Mois (date de fabrication).

Caractéristiques

Gaz disponibles : O₂, Air, N₂O, Vide.

Pression d'utilisation : selon DIN 13260 Section 2 et EN 737.

Gaz : 5 bar ± 0.5 bar,

Vide : - 0.7 bar ± 0.2 bar.

Profondeur de l'installation dans le mur : approx. 62 mm.

Plastique d'égalisation : approximativement 13 mm sur une installation fixe.

Matériaux :

- Bouton poussoir : plastique.
- Pièces de blocage : inox, métal.
- Corps de valve : métal nickelé et chromé.
- Corps de prise : métal.
- Clapet anti-retour : métal.
- Parties en contact avec le gaz : métal.


Marquage CE 0044.

Hygiène

Nettoyage par un détergent du commerce sans alcool et sans solvant. S'assurer qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur du dispositif.

Entretien et maintenance

Vérification tous les 6 mois de la solidité et du bon fonctionnement de la connexion. Remplacement des pièces si elles sont défectueuses.

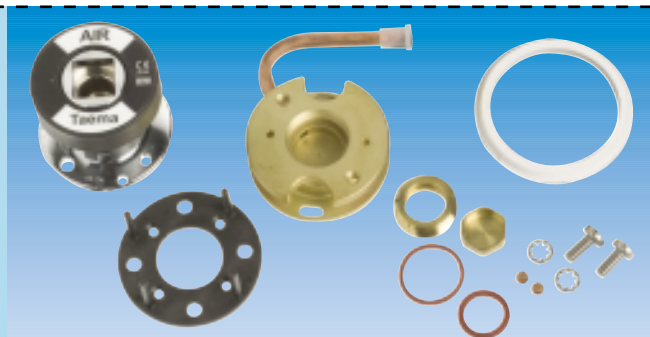

Prise DIN en gaine



Prise DIN encastrée

références

Référence	Désignation	Gaz	Montage
BM002100	PRISE DIN	O ₂	En saillie
BM002300	PRISE DIN	Air	
BM002400	PRISE DIN	N ₂ O	
BM002200	PRISE DIN	Vide	
BM003100	PRISE DIN	O ₂	En gaine
BM003300	PRISE DIN	Air	
BM003400	PRISE DIN	N ₂ O	
BM003200	PRISE DIN	Vide	
BM004100	PRISE DIN	O ₂	Encastrée
BM004300	PRISE DIN	Air	
BM004400	PRISE DIN	N ₂ O	
BM004200	PRISE DIN	Vide	

accessoires

Référence	Désignation	Gaz
BJ025100	Embout équerre DIN	O ₂
BJ025200	Embout équerre DIN	Air
BJ025300	Embout équerre DIN	N ₂ O
BJ025400	Embout équerre DIN	Vide