

# RAMPE PLAN D'URGENCE

La **RAMPE PLAN D'URGENCE** est destinée à répondre à un afflux massif de victimes. Elle permet de constituer un mini-réseau de distribution d'oxygène démontable et transportable pour Postes Médicaux Avancés.



## Haute performance

- Délivrance d'oxygène à 10 patients simultanément à un débit réglable de 1 à 15 l/min.
- Grande précision des débits grâce aux débitmètres à détente intégrée **SELECTAFLO**.
- Possibilité de branchement d'un respirateur d'urgence (alimentation de 3.5 à 5 bar, 150 l/min).

## Qualité

- Solidité de chaque élément
- Matériaux résistant à la corrosion : laiton chromé, inox, aluminium.

## Entretien et Maintenance

- Vérification de bon fonctionnement et contrôle une fois par an.
- Maintenance préventive à 5 ans des débitmètres.
- Changement des **EMBOUFIX** à 5 ans

Taema

## Composition du kit

1 rampe d'alimentation pour 6 bouteilles,  
6 flexibles basse pression **EMBOUFIX** pour le raccordement des bouteilles à la rampe d'alimentation,  
4 mini rampes de 2 prises médicales O<sub>2</sub> NF,  
1 mini rampe de 2 prises médicales O<sub>2</sub> NF avec 1 manomètre,  
5 flexibles de 3 m basse pression O<sub>2</sub> de liaison des mini rampes  
1 flexible de 6 m basse pression O<sub>2</sub> de liaison des mini rampes  
10 débitmètres **SELECTAFLO** O<sub>2</sub> 0-15l/min à installer sur chaque prise.

## Caractéristiques

Gaz : O<sub>2</sub>

Alimentation : 3,5 à 5 bar, 150 l/min minimum.

Pression de sortie minimum à chaque prise : 3,5 bar

Débit de sortie :

- 120 l/min maximum sur une prise.
- 150 l/min maximum au total sur les 10 prises de sortie.

Débitmètre : **SELECTAFLO** NF 0-15l/min (0-1-1.5-2-3-4-6-9-12-15)

Température d'utilisation : -10°C / 60°C

Température de stockage : -20°C / 60°C

Dimensions (mm) et poids :

- rampe O<sub>2</sub> d'alimentation : 320 (L) x 126 (H) x 118 (P) ; 2 Kg
- mini-rampe O<sub>2</sub> 2 postes : 149 (L) x 126 (H) x 118 (P) ; 1 Kg
- mini-rampe O<sub>2</sub> 2 postes 1 mano : 164 (L) x 126 (H) x 118 (P) ; 1.2 Kg
- **EMBOUFIX** : 3 m, 550 g
- flexibles BP de liaison : 3 m, 550 g ; 6 m, 900 g
- **SELECTAFLO** : 98 mm x Ø50 mm, 395 g

Masse totale : 17.5 kg

Marquage CE 0459, directive 93/42/CEE.

## Facilité de montage et de démontage

Flexible à raccords rapides sans vissage,

Rampes munies de système d'accrochage pour tube (lit, barre,...),  
Capuchons de protection sur chaque connecteur.

## Hygiène

Nettoyage : avec un chiffon légèrement humide.

Désinfection :

- avec une solution à base d'alcool (spray ou lingettes),
- avec une solution marquée CE (type Hexanios G+R<sup>®</sup> – Anios).

**Attention** : ne pas utiliser d'abrasif (poudre ou autres). Ne pas immerger les éléments.

